


# 使い捨て駆血帯 子供用

Gentle Care, Bright Comfort

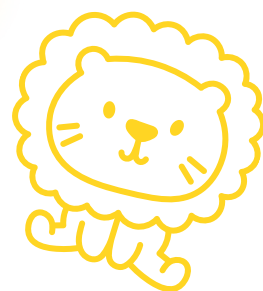

鮮やかな彩りで医療を明るく  
安全でやさしい駆血帯

ドイツ製



brighten your care  
colorful medical supplies for happier hospital!

## 特長

### ☆ 衛生的

- 単回使用で細菌の伝播を防ぎ、交差汚染のリスクを軽減
- 医療スタッフの衛生基準を満たし、かつ時間のかかる消毒は不要

### ☆ やさしい

- 皮膚表面のねじり、圧迫がない
- 患者にとって心地よい感触

### ☆ 簡単


- マジックテープ仕様のため、簡単に圧迫・取り外しが可能
- 伸縮性があるため、簡単に圧の調整が可能

### ☆ 安全

- ラテックスフリー、シリコンフリー、DEHP(フタル酸エステル)フリー
- 熱と湿気への耐久性が強い


## 製品情報

- 製品コード：BIC-521003013
- JANコード：4582645180317
- 製品名：ビーアイシー使い捨て駆血帯（KIDS用）
- サイズ：幅 3cm×長さ 50cm
- 入数：1箱（125個入り）

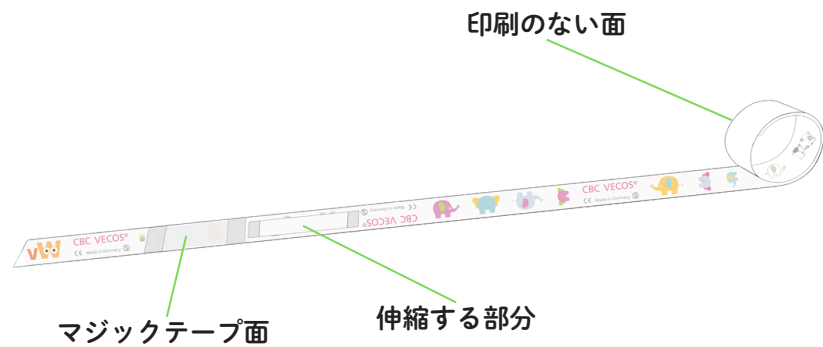

交差感染を防ぐために使用後は、廃棄規定に従って廃棄してください。  
製品についてお気づきの点やご質問がございましたら、  
弊社までお問い合わせください。

## 使用説明

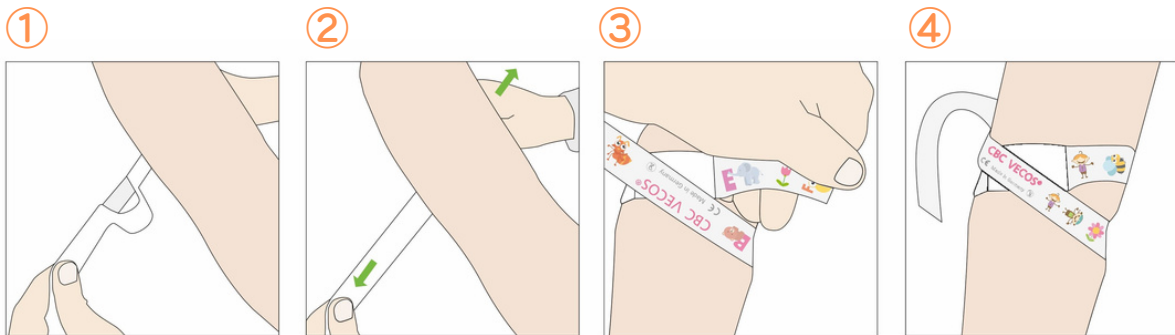

① ストラップの印刷されていない面を患者の腕に当てます。

② 駆血力を強めるため完全に伸ばしてください。

③ しっかりと腕に巻いてマジックテープ面で固定します。(60秒以内に解除してください)

④ ストラップを引っ張って解除してください。

### 【製造販売元】

ビーアイシーグループ株式会社 **BICMEDICAL**  
 ビーアイシーメディカル事業部  
 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-1 新国際ビル  
 TEL：03-6269-9120 FAX：03-6269-9118  
 E: contact@bicmedical.com HP: bicmedical.com